

INSTRUCCIONES PARA RECOGIDA DE MUESTRA DE ORINA CON KIT DE VACIO

Los kits de recogida de muestras están disponibles en las principales conserjerías de los campus

- 1.- La muestra idónea debe tomarse en la primera micción de la mañana del día de la citación.
- 2.- Se recomienda realizar higiene genital previa para evitar contaminaciones de la muestra.




3.- Desenroscar la tapa y depositarla sobre una superficie limpia. No quitar la pegatina (riesgo de punción).

4.- Evitar el contacto con las partes internas del recipiente.

5.- Desechar la primera parte de la micción y llenar $\frac{3}{4}$ del recipiente aproximadamente.

6.- Cierre correctamente el bote roscándolo con firmeza.

7.- Mueva ligeramente el recipiente para homogenizar la muestra recogida.

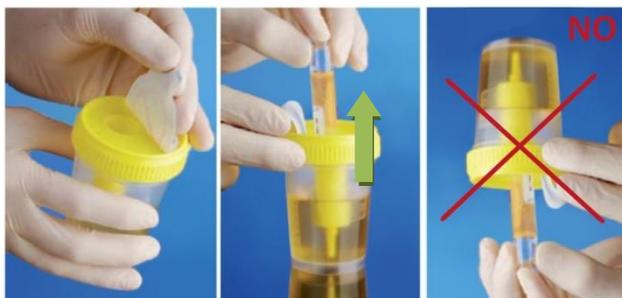

8.- Retire la etiqueta desde la lengüeta con precaución de no introducir el dedo por el orificio.

9.- Con el recipiente de la muestra apoyado sobre superficie dura, inserte el tubo con el tapón hacia abajo hasta que pinche la aguja y el líquido ascienda por el tubo.

10.- Deseche el recipiente y entregue el tubo con la muestra en el Centro de Salud Laboral.

NOTA: Si el tubo ha perdido el vacío y no sube la orina; abra la tapa del recipiente, retire el tapón del tubo, vierta con precaución la muestra, cierre el tapón presionando con fuerza y limpie el exterior del tubo con agua y papel.